

Connexion du prolongateur Compat[®] Buddy à un bouton de gastrostomie

Matériels nécessaires



Prolongateur coudé ou droit



Bouton de gastrostomie



Seringue ENFit[®]



Compresses



Verre d'eau

Étapes

1



Fermer le clamp.

2



Aligner la dent de connexion du prolongateur à l'encoche du bouton pour insérer dans le site d'alimentation.

3



Aligner le tube du prolongateur avec le bouchon du bouton.

4



Appuyer délicatement sur le connecteur pour l'insérer dans le bouton.

5



Tout en maintenant le bouton en place, effectuer $\frac{3}{4}$ de tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sentir une légère résistance.

6



Après ouverture du clamp, connecter une seringue ou la tubulure de nutrition.

Retrouvez ces étapes à 2 min 30 de la vidéo Soins et utilisation du bouton de gastrostomie Compat[®] Buddy sur www.compatbuddy.fr