

Kleefcrème voor kunstgebit met Aloe Vera en Mirre Tube van 40 gr



- Langdurig comfort, zorg en veiligheid.
- Niet oplosbaar, bestand tegen speeksel en voedsel, verzekert ook een perfecte stabiliteit van de prothese de hele dag.
- Perfecte hechting van de prothese om te voorkomen dat voedselresten vast komen te zitten.
- Zonder aroma, verandert de smaak van het voedsel niet.
- Aloë Vera en Mirre, natuurlijke stoffen in de formule, versterken en kalmeren het geïrriteerd of gevoelig tandvlees als gevolg van een slecht passende prothese.
- Het fixerende en stabiliserende vermogen vermindert effectief het risico op irritatie door wrijving van de prothese.
- Zonder zink.
- Hoe te gebruiken:
 - Was en droog de prothese op de juiste manier.
 - Breng de kleefcrème aan in lijnen, niet te dicht bij de rand.
 - Sluit zorgvuldig de tube.
 - Zet de prothese op zijn plaats en druk stevig de kaken op elkaar.
 - U kunt met een gerust hart eten, drinken en lachen.