

Dagelijkse pillendoos Medi-7 Trio, wit, 3 in 1



- 3 functies
- Deler: de pil in de voorziene uitsparing leggen, sluiten en lichtjes op het deksel duwen, nadien de gewenste hoeveelheid nemen
- Verbrijzelen: de pil in de voorziene uitsparing leggen en

het deksel meerdere keren sluiten, tot de gewenste consistentie is verkregen

- Bewaring: De pillen kunnen bewaard worden in de voorziene uitsparingen tot op het moment van gebruik